

一次性雾化喷雾装置说明书

【产品名称】

一次性雾化喷雾装置（商品名：小容量雾装器）

【产品型号】

SO-1615, SO-1616, SO-1617, SO-1618, SO-1619, SO-1620, SO-1621

【注册人名称和地址】

Salter Labs

2365 Camino Vida Roble Carlsbad, CA USA 92011

【产品主要结构、性能】

产品雾化量应 ≥ 0.27 mL/min，本产品由喷雾罐、输气管、T形管、口含管、螺纹管和面罩组成。

体积的药物喷雾器能在水平或竖直位置产生 3 毫升的气溶胶粒子，而耗时不到 10 分钟。

【产品使用范围】该产品用于药液的雾化吸入。


【禁忌证】尚未明确。

【注意事项、警世及提示性说明】

- 1、 属于一次性使用产品，可以供单一病人多次使用，不能交叉或重复使用。
- 2、 超过使用期限后不得使用。
- 3、 发生包装破损影响产品的质量时不得使用。

【使用说明】

根据图 1 的指示添加药物并组装套件。使用超过 10PSI (0.7bar) 的驱动压力将管道连接到气源。启动压缩机或将流量设置为 4-8LPM。

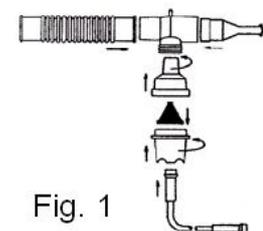

【产品的维护和保养方法】

本产品为一次性产品，根据图 1 的指示进行拆卸，并在热水和非柠檬类餐具洗涤剂中清洗所有部件（不包括管道）。使用热水充分清洗，并风干或用无绒布擦干。当干燥时，根据图 1 的指示重新装配喷雾器，并将套件保存好，以备下次使用。

【保存方法】

在清洁、干燥的室温保存。

避免高湿、高温、日光照射、荷重。

避免在化学药品存放的地点以及有腐蚀性气体产生的地点保存。

避免划伤及扎伤包装材料。